

Bipolare TUR P		
Instrumentarium		
Niederdruckresektoskop Set Ch 26 Storz	1	Bipolar Schlingen 27040 GP bei TUR Blase 27040 GPV bei TUR Prostata
30 Grad Optik	1	
Kaltlichtkabel	1	
Glas Blasenspritze	1	
Einführhülse	1	bei Bedarf
Trichterset mit Schlauch	1	
Abdeckung		
TUR Abdeckset Set	1	
sonstiges Zubehör:		
Glycosid	3	nach Bedarf
Endosgel a 11 ml	2	
Spül Katheter Ch 22	1	Voll Silicon
Ausnahme: Prof Häcker verwendet 22 Bard Katheter		
Urinbeutel groß	1	
NACL Kanister a 10 l		nach Bedarf
Anschlußsystem für Kanister	1	
Spülbeutel NACL	1	

Anschlußsystem für Beutel		
Einmalblasenspritze	1	2 x bei Prof. Häcker
Kittelset TUR	1	
Handschuhe		nach Bedarf
Geräte		
Bildschirm	1	einschalten und justieren
Kamerasystem mit Hängekamera	1	steril beziehen, anschließen und einschalten
Kaltlicht Gerät	1	anschließen und einschalten
Erbe Vario mit Fußschalter	1	einstellen auf Bipolare TUR einstellen und anschließen ,Fußschalter bereitstellen
Neutral Elektrode und Kabel	1	siehe Neutralstandard
Absaugpumpe mit Schlauchsystem	1	
Versorgung der Präparate		siehe Verfahrensanleitung
Aktualisiert Juni 2013		
Erna Beck		